

Kit de readaptación para tránsito

Verificación previa a la instalación

Verificaciones previas a la instalación

Las siguientes verificaciones deben realizarse antes de la instalación del Kit de readaptación para tránsito. La ausencia de estas inspecciones puede comprometer la integridad de la silla de ruedas durante el transporte y provocar lesiones graves o hasta la muerte. Corrija cualquier problema o discrepancia que se detecte. Si no es posible reparar el problema/discrepancias, no instale el Kit de readaptación para tránsito.

1. Inspeccione todas las soldaduras del armazón en busca de signos visuales de grietas o fracturas. No debe haber grietas visibles. En las zonas soldadas o curvadas, asegúrese de eliminar cualquier suciedad que pueda impedir una inspección adecuada.

2. Inspeccione todos los herrajes en busca de signos de hendiduras, grietas u holguras. Apriete todas las tuercas, pernos y tornillos sueltos según la torsión de ajuste especificada en el manual del propietario. Sustituya los herrajes rotos, doblados o corroídos.

3. Inspeccione las ruedas, las horquillas de las ruedas y los ejes en busca de signos visuales de daños tales como abolladuras, grietas en el plástico o hendiduras. No debe haber daños visibles.

4. Inspeccione los tubos y los orificios de montaje. Los tubos no deben estar abollados, doblados o deformados de ninguna manera que pueda comprometer la superficie de montaje. Los orificios de montaje no deben mostrar NINGÚN signo de deformación del material.